

DESCRIPCIÓN

Fonendo M. Waitch Tipo Litt

INDICACIONES

Para la auscultación de sonidos de alta y baja frecuencia.

CARACTERÍSTICAS



Campana doble, ligera, de aluminio.

- Tubo de PVC, flexible, disponible en distintos colores.
- Olivas de PVC blanco.
- Arco metálico enfundado en el tubo.
- Libre de látex

MODO DE USO

Para baja frecuencia posicione la campana encima el punto de auscultación. Para alta frecuencia; posicione la membrana sobre el punto de auscultación.

PRECAUCIONES

Preservar el fonendoscopio de temperaturas extremas. No poner en contacto con aceites o disolventes.

No sumergir el fonendo en líquidos.

No esterilizar en autoclave.

LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN

Las olivas se sacan desenroscándolas.

Para sacar el diafragma, coger por el borde con dos dedos y desenroscar. Lave en agua fría con jabón neutro o pasar un paño suave humedecido con alcohol.

Limpie la campana con agua y jabón neutro o con alcohol.

Antes de ensamblar de nuevo las distintas partes séquelas concienzudamente.

PRESENTACIÓN:

Dispositivo de doble campana para diagnóstico y evaluación física.

CLASIFICACIÓN

Según Real Decreto 1591/2009: Producto Sanitario, de Clase I.

1 unidad en caja de cartón, exceptuando el modelo c/estuche que se presenta en una caja en sky.

COLORES

Gris, rosa, azul, verde, rojo, amarillo y negro