


# Bolsa de orina con grifo

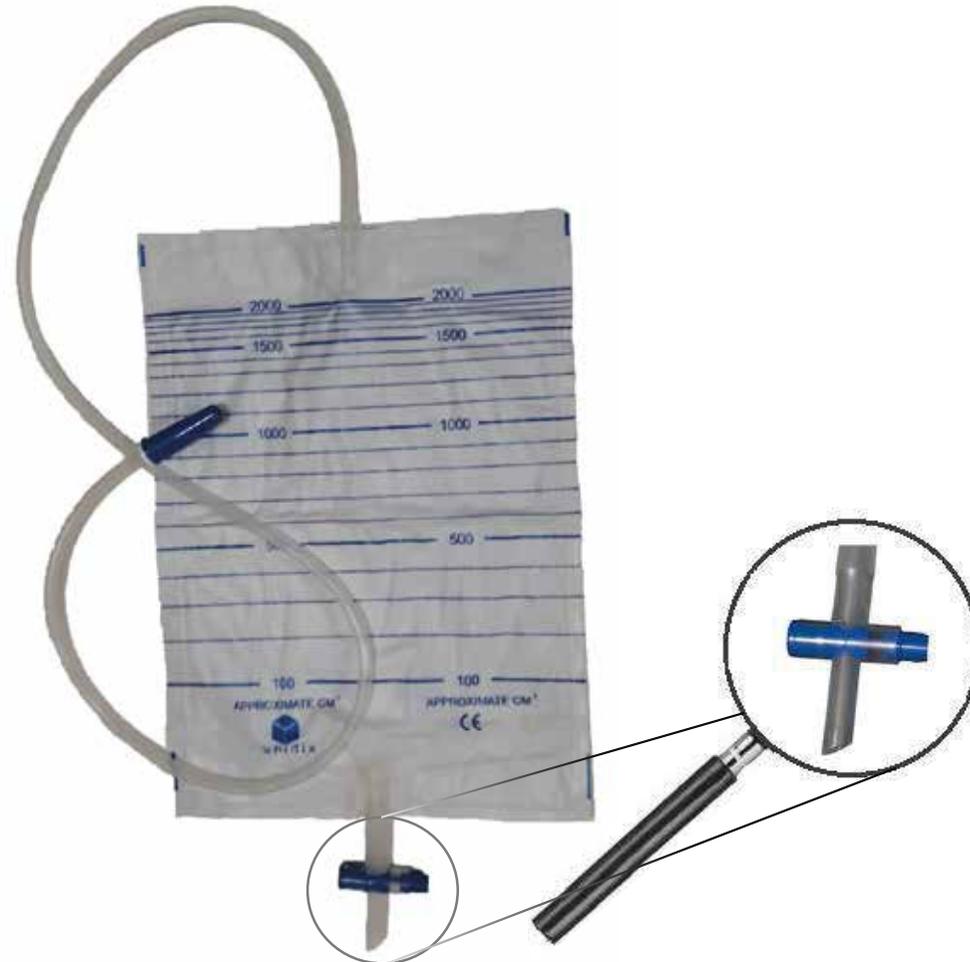

# Bolsa de orina con grifo

Bolsa con válvula antireflujo y grifo para la recogida y medición de orina con diferentes fines terapéuticos o diagnósticos.

El sistema de vaciado mediante grifo permite la extracción de la orina sin necesidad de manipular la conexión al catéter.

Disponibile no estéril o estéril mediante Óxido de Etileno.

## PROPIEDADES BOLSA

Compuesta de PVC.

- Capacidad nominal 2000ml
- Apariencia: Transparente fondo blanco
- Escala medidora en azul cada 100ml
- Válvula antireflujo al inicio del tubo.
- Dimensiones
  - Largo 268mm
  - Ancho 197mm
- Corte e impresión con termosellado.
- Ojales de sujeción en esquinas superiores

## PROPIEDADES TUBO

Composición PVC.

- Apariencia: Translúcido
- Longitud: 900mm
- Diámetro externo 6.5mm

## PROPIEDADES CONECTOR

- Composición:
  - Conector PVC blanco
  - Tapón PE azul
- Compatible con las partes conectoras de los catéteres

## PROPIEDADES GRIFO

- Con lubricante siliconado.
- Grifo en cruz.
- Sistema de apertura/cierre seguro mediante desplazamiento horizontal de la pieza azul.

## MODO DE EMPLEO DE BOLSA DE ORINA CON GRIFO UNIDIX

- › Extraer del paquete.
- › Verificar que el grifo está cerrado
- › Retirar la capucha protectora y conectar a la sonda.
- › Una vez lleno desplazar la pieza de apertura del grifo hasta vaciado y volver a cerrar.

## BENEFICIOS

- › Permite valorar el drenaje obtenido; fondo blanco para coloración y escala medidora para cantidad (valor aproximado)
- › Permite visualizar el tubo de drenaje y mantenerlo limpio y sin obstrucciones.
- › Perímetro con doble soldadura que garantiza la recogida del fluido, sin pérdidas.
- › Tubo de drenaje flexible permite ser pinzado y despinzado.
- › Válvula antireflujo que impide el potencial regreso de la orina a la sonda y al paciente.
- › Conector a sonda con rugosidades que permiten un mejor agarre de la misma.
- › Tapón protector en el extremo distal conector.
- › Aporta un entorno de higiene y limpieza al permitir el vaciado de la bolsa sin la necesidad de la desconexión del catéter.
- › Partes del grifo en distintos colores que permiten identificar visualmente si el grifo está abierto o cerrado.
- › Puntos de anclaje para mantener la bolsa colgada.
- › Material biocompatible y 100% exento de látex.

	Referencia	Unidades	EAN13
No estéril	20015200	200	8435195220698
Estéril	20018	100	8432229272920