

# Bolsa de frío/calor

Ref. 41022      Cód. EAN 8430655410220



- Bolsa de frío/calor reutilizable
- Para terapias con frío (propiedades analgésicas y antiinflamatorias) o con calor (relajación y ayuda a la circulación)
- Composición del gel: agua, glicerol, carboximetilcelulosa, ácido poliacrílico, sal sódica, 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona
- Gel no tóxico
- Peso: 450g
- Medida: 25,6x14,8 cm
- Color: azul
- Frío: colocar la bolsa en el congelador. Dependiendo del efecto deseado (bolsa flexible o rígida) el tiempo que requiere la bolsa en el congelador y la temperatura recomendada varían. La bolsa permanecerá flexible siempre y cuando la almacene por encima de -18°C. Por debajo de -18°C el gel empezará a congelarse.
- Calor: calentar la bolsa al baño maría hasta que hierva, o en el microondas sumergido completamente en agua durante 3 minutos (600W)
- Producto sanitario de Clase I según el anexo VIII del Reglamento 2017/745 de productos sanitarios
- Marcado CE en cada envase
- Fabricado bajo el estándar de calidad EN UNE ISO 13485:2016