

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>FECHA: 01.10.2021</b> <b>REV: 00</b> <b>PÁGINA: 1 de 4</b>
	<b>Buscapuntos con Tratamiento POINTER EXCELL II</b>	

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	Buscapuntos con Tratamiento
<b>MODELO</b>	POINTER EXCEL II
<b>TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN</b>	AGU-PUNT S.L.
<b>REFERENCIA</b>	AD5002B

<b>DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO</b>	<p>Se trata de un aparato de última generación, con pantalla digital, localizador de gran precisión y estimulador de puntos de acupuntura y de puntos “trigger” incluso por medio de microcorrientes y con cambio de polaridad.</p> <p>El “POINTER EXCEL II” estimula las terminaciones nerviosas del cuerpo basándose en la electricidad, aplicando corrientes de polaridad distinta (para tonificar o sedar) a través de la piel. Esto tiene el objetivo de aliviar algunos tipos de dolores crónicos y agudos, así como también los derivados de procesos postoperatorios.</p>
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Portátil y ligero</li> <li>- Forma alargada y anatómica que facilita un manejo muy cómodo.</li> <li>- Con interruptor de ajuste de sensibilidad, intensidad de corriente y cambio de polaridad</li> <li>- Estimulación a través de microcorrientes.</li> <li>- Detección de la señal: bip sonoro, señal luminosa y pantalla digital</li> <li>- Posibilidad de ajuste del nivel del bip sonoro</li> <li>- Pantalla digital que indica la sensibilidad en la búsqueda y la frecuencia en el tratamiento</li> <li>- Dos punteros detectores intercambiables: para Acupuntura y Auriculopuntura.</li> <li>- Estimulación directa del punto.</li> </ul>
<b>ESPECIFICACIONES</b>	<p>Microcorrientes: Zona azul de control de intensidad (0-4,4 mA)</p> <p>Intensidad de salida: 0-22 mA. Regulable</p> <p>Frecuencia de salida: Ajustable de 1 a 16 Hz</p> <p>Selector de polaridad: (+/-)</p> <p>Amplitud de onda: 220 sec.</p> <p>Tipo de onda: Continua</p> <p>Dimensiones: 17x3,3x2,3 cm</p> <p>Peso del aparato: 60 gr.</p> <p>Peso total (con estuche): 230 gr.</p> <p>Fuente de energía: 1 pila de 9V (la duración de la pila puede ser de entre 4 y 20 horas, dependiendo el</p>

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>FECHA: 01.10.2021</b> <b>REV: 00</b> <b>PÁGINA: 2 de 4</b>
	<b>Buscapuntos con Tratamiento POINTER EXCELL II</b>	

	tiempo de cada tratamiento)
<b>INDICACIONES</b>	Este aparato está indicado para aliviar algunos tipos de dolores crónicos y agudos, así como también los derivados de procesos postoperatorios.
<b>DURACIÓN DE LA APLICACIÓN</b>	La duración del tratamiento y el tiempo de estimulación depende del punto o área a tratar y de otros factores, generalmente, la duración del tratamiento varía entre 3 y 20 segundos, siendo las más utilizadas de 3.5, 10, 15, o 20 segundos. Solo debe aplicarse un tratamiento más largo en algunos casos específicos. El tiempo de duración más adecuado para un tratamiento deberá ser establecido por el profesional basándose en su experiencia y conocimientos.
<b>MODO DE EMPLEO</b>	<p><u>SONDAS INTERCAMBIABLES</u> Se proporcionan dos sondas para diferentes aplicaciones. La sonda más pequeña debe utilizarse para localización y tratamiento de los puntos situados en la oreja; mientras que la más grande es más adecuada para los puntos situados en el cuerpo.</p> <p><u>REGULACION DE LA SENSIBILIDAD</u> El grado de sensibilidad para la detección es regulable. El botón "SEN" también se utiliza para aumentar (girándolo en la misma dirección de las agujas del reloj) o disminuir (girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj) la sensibilidad, función que resulta muy útil ya que el aparato deberá ser utilizado con diferentes tipos de pieles (pieles secas o pieles más húmedas), el POINTER EXCEL II le permite conocer el nivel de sensibilidad a través de su pantalla digital.</p> <p><u>ELECTRODO MANUAL</u> El usuario debe sujetar con la mano el electrodo manual para cerrar el circuito eléctrico que se crea. Este accesorio se puede conectar y desconectar muy fácilmente del aparato. Nota: El POINTER EXCEL II también puede utilizarse sin electrodo manual. En este caso, el usuario debe establecer un contacto digital con la placa plateada que hay en el aparato, al mismo tiempo que su otra mano también esté en contacto con la piel desnuda del paciente (para que así se cierre el circuito eléctrico) No es necesario utilizar el electrodo manual cuando se está usando el POINTER EXCELL II en un autotratamiento; se puede utilizar el sistema de la placa plateada.</p>

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>FECHA: 01.10.2021</b> <b>REV: 00</b> <b>PÁGINA: 3 de 4</b>
	<b>Buscapuntos con Tratamiento POINTER EXCELL II</b>	

	<p><b>FUNCION DE LOCALIZACIÓN DE PUNTOS Y TRATAMIENTO CON CAMBIO DE POLARIDAD</b></p> <p>Se selecciona la polaridad de la estimulación (+ / -), se presiona el botón situado en la parte superior del aparato para activar la función de estimulación; entonces se emite a través de las sondas una corriente eléctrica continua ajustable, de 1 a 16Hz. La intensidad de dicha corriente también debe ajustarse desde 0 a 22 mA y debe controlarse con el botón denominado "INT", Si desea aplicar microcorrientes, deberá seleccionar la zona de color azul (en el regulador de intensidad). Se puede incrementar de una manera suave la estimulación del POINTER EXCEL II humedeciendo ligeramente la piel del paciente.</p> <p>NOTA: durante la estimulación el POINTER EXCEL II le permite conocer a través de su pantalla digital la frecuencia aplicada en el momento del tratamiento.</p>
<b>PRECAUCIONES</b>	<p>No aplicar en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pacientes con deficiencias cardíacas.</li> <li>- Mujeres embarazadas.</li> <li>- En zonas que estén cerca del corazón.</li> <li>- Directamente sobre una cicatriz o cerca.</li> <li>- Sobre tatuajes.</li> <li>- Sobre quemaduras o cortes.</li> </ul> <p>Apagar el aparato después de utilizarlo y retirar las pilas cuando no se vaya a usar el aparato durante un período de tiempo prolongado.</p>

<b>FABRICADO POR</b>	<p>TENS PLUS IND. CO.  C11, 6/F., WING HING IND BLDG.14, HING YIP STREET,  KWUN TONG, KOWLOON HONG KONG.</p>
<b>EMBALAJE</b>	<p>Caja con 1 equipo y los siguientes accesorios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 electrodo de masa</li> <li>- 2 punteros intercambiables para Auriculopuntura y Acupuntura</li> <li>- 1 estuche de plástico forrado de goma espuma</li> </ul>
<b>FOTO DEL PRODUCTO (equipo de color azul)</b>	

	<b>FICHA TÉCNICA</b>	<b>FECHA: 01.10.2021</b> <b>REV: 00</b> <b>PÁGINA: 4 de 4</b>
	<b>Buscapuntos con Tratamiento POINTER EXCELL II</b>	

<b>CERTIFICADO POR</b>	TÜV Rheinland LGA Products GmbH
<b>PAÍS</b>	Alemania
<b>NÚMERO DE ORGANISMO NOTIFICADO</b>	CE 0197 