

	FICHA TÉCNICA	FECHA: 26.03.2021 REV: 00 PÁGINA: 1 de 2
	APS Destroyer®	

NOMBRE DEL PRODUCTO	APS Destroyer®
TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	AGU-PUNT S.L.
REFERENCIA	A1052B – Destructor de agujas
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN	4170PS

NORMAS DE REFERENCIA	Directiva 93/42/EEC Directiva 2014/30/EU Directiva 2014/35/EU EN 61326-1:2013 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013 EN 61010-1:2010 EN 60601-1:2006 EN 60601-1-2:2015 EN 1041:2008 EN ISO 15223-1:2016 ISO 14971:2012
MODELO	BD-320

GARANTIA	Los equipos APS Destroyer® están cubiertos por una garantía de un año. La garantía entra en vigor el día de la factura o documento de compra.
MANTENIMIENTO	Los equipos APS Destroyer® no requieren ningún tipo de mantenimiento, siempre y cuando se use de acuerdo a sus instrucciones de uso recomendadas por el fabricante.
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO	- Temperatura: -10°C a 40°C. - Conservar en un lugar fresco. - No poner más de tres niveles de peso por encima.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	El equipo está diseñado para destruir la aguja desechable y puede evitar la generación de contaminación. Funciona con corriente alterna, sólo genera una pequeña cantidad de residuos y es sencillo de limpiar sin ningún contaminante.
INDICACIONES	Este equipo está indicado para destruir las agujas desechables de punción seca o acupuntura, sustituyendo los antiguos botes de recogida de productos biopeligrosos. Destruye las agujas de una en una.

	FICHA TÉCNICA	FECHA: 26.03.2021 REV: 00 PÁGINA: 2 de 2
	APS Destroyer®	

INSTRUCCIONES DE USO	Antes de usarse consiga un abastecimiento de corriente alterno, entonces encienda el interruptor, el indicador de energía se encenderá y eso indica que el circuito eléctrico de derretimiento de la aguja trabaja bajo condiciones normales. 1. Destrucción de la aguja: Ponga la aguja dentro del agujero de derretimiento de la máquina, presione la jeringa hacia abajo inclinándola lentamente hasta el fondo (todo el proceso se hará en unos 3 segundos). Es normal que se produzca destellos en el agujero durante el proceso. 2. Limpiar el cajón de almacenaje de los residuos: Presiones el cajón ligeramente y gire a la derecha al mismo tiempo para sacarlo. Limpie los residuos y vuelva al principio. Gire a la izquierda hacia el interior para insertarlo. El cajón final de la maquina es usado para guardar los residuos y debe ser limpiado cada día o después de haber destruido 200 piezas.
PRECAUCIONES	- No gire la máquina, ya que los residuos pueden ser dejados dentro y pueden dañar el equipo. - No ponga ningún conductor eléctrico dentro de los agujeros para prevenir daños en la máquina. - No introducir más de una aguja en el agujero. - No ponga ningún objeto distinto al cual está destinado el equipo ni ponga los dedos en el agujero, pues puede ocurrir un accidente serio.

FABRICADO POR	SHENZHEN BESTMAN INSTRUMENT CO., LTD.
EMBALAJE	Caja con 1 equipo
FOTO DEL PRODUCTO (equipo de color azul)	
CERTIFICADO POR	Anbotek Compliance Laboratory Limited
PAÍS	China