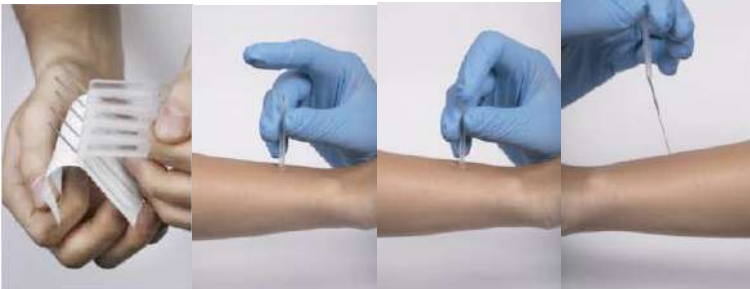


 You need it, we needle it.	FICHA TÉCNICA	Fecha: 24-01-2023 V.7
---	----------------------	--------------------------

Nombre del producto	Aguja de acupuntura punción seca (APS)
Fabricante	AguPunt SL
Referencia	Ver anexo I
Certificado	ES19/86786

Norma de referencia	Directiva 93/42/EEC producto sanitario
Modelo	Ver anexo I
Material	Aguja de acero calidad AISI304H - C (0,08%) - Si (0,44%) - Mn (1,26%) - P (0,31%) - S (0,05%) - Ni (8,10%) - Cr (18,14%) - N (0,04%) - CO (0,21%)

Expiración	5 años desde la fabricación
Condiciones de almacenamiento	○ Conservar en lugar seco ○ Temperatura máxima de almacenamiento 50°C
Descripción del producto	Instrumentos estériles, largos, delgados y puntiagudos que se utiliza para estimular los nervios periféricos.
Instrucciones de uso	Utilice guantes de un solo uso. Abra el envase unitario separado de dos lengüetas localizadas en la parte superior del envase unitario. Doble el blíster hacia el exterior para permitir la extracción del conjunto aguja + fiador con código de colores (en caso de disponer de él) + guía (si dispone de ella). 1. Inserción de la aguja: Introducir la aguja en el emplazamiento elegido a criterio del terapeuta y en función de la técnica de elección. 2. Una vez insertada la aguja, esta puede ser manipulada en función del tipo de tratamiento a seguir. 3. Extracción de la aguja: En los tratamientos de fisioterapia, una vez terminado el tratamiento e inmediatamente después de retirar la aguja, debe practicarse una hemostasia en la zona de inserción.

	
Precauciones	• Es un producto de un solo uso que debe destruirse después de su uso, de acuerdo con los protocolos locales. No reutilizar, su reutilización puede causar infecciones o contaminación cruzada. • Es un producto estéril. La esterilización se lleva a cabo con óxido de etileno. • Prohibido el uso si hay un defecto en el embalaje. En caso de daños en el embalaje estéril, desecha la aguja. • Prohibido si un paciente tiene un trastorno hemorrágico o toma anticoagulantes. • Evite venas primarias, ojos, área genital, nariz interna, labios. Las áreas con infecciones de la piel, consulte de antemano con un dermatólogo. • En caso de sangrado, desinfecte el área y presione hasta el final del sangrado. • Durante el tratamiento, el paciente puede notar dolor leve o agudo, área adormecida. En algunos casos puede causar mareos o pérdida de conciencia. Si ocurre el tratamiento debe suspenderse. • En caso de rotura y permanencia de la aguja insertada, debe ir a un hospital para extraerla. • Este producto no necesita instalación, pero debe ser usado por profesionales cualificados con experiencia. • Si la aguja de acupuntura se utiliza repetidas veces puede causar infección iatrogénica. • Utilizar siempre guantes de un solo uso, para evitar la contaminación de la aguja y de la zona de inserción. • La inserción de la aguja, el tratamiento y la extracción pueden ser levemente dolorosos y pueden causar adormecimiento de la zona.

Fabricado por	Agupunt SL
Embalaje	Caja con 100 agujas.
Foto del producto	

Certificado por	SGS House Noorderlaan
País	Bélgica
Número Organismo Notificado	CE 1639 

Anexo I

REF.	DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION	CANTIDAD / QTY.
A1010P	APS REGULAR 0,30x75	100
A1012P	APS REGULAR 0,30x70	100
A1037BP	APS REGULAR 0.16x25	100
A1037P	APS REGULAR 0.25x13	100
A1038P	APS REGULAR 0.25x25	100
A1040P	APS REGULAR 0.30x40	100
A1041P	APS REGULAR 0,32x40	100
A1042BP	APS REGULAR 0,30x50	100
A1042CP	APS REGULAR 0,30x60	100
A1042P	APS REGULAR 0,25x40	100
A1043P	APS REGULAR 0,25x30	100
A1044P	APS REGULAR 0.20x30	100
A1045P	APS REGULAR 0.30x30	100
A1046P	APS REGULAR Mix	100
A1047P	APS REGULAR 0.30x100	100
A1049P	APS REGULAR 0.35x125	100
A1037BPC	APS CLICK 0.16x25	100
A1044PC	APS CLICK 0.20X30	100
A1037PC	APS CLICK 0.25X13	100
A1038PC	APS CLICK 0.25x25	100
A1043PC	APS CLICK 0.25X30	100
A1042PC	APS CLICK 0.25X40	100
A1045PC	APS CLICK 0.30X30	100
A1040PC	APS CLICK 0.30X40	100
A1042BPC	APS CLICK 0.30X50	100
A1042CPC	APS CLICK 0.30X60	100
A1010PC	APS CLICK 0.30x75	100
A1041PC	APS CLICK 0.32X40	100
A1037BPD	APS DROP 0.16x25	100
A1044PD	APS DROP 0.20X30	100
A1037PD	APS DROP 0.25x13	100
A1038PD	APS DROP 0.25x25	100

A1043PD	APS DROP 0.25X30	100
A1042PD	APS DROP 0.25X40	100
A1047PD	APS DROP 0.30X100	100
A1045PD	APS DROP 0.30X30	100
A1040PD	APS DROP 0.30x40	100
A1042BPD	APS DROP 0.30x50	100
A1042CPD	APS DROP 0.30X60	100
A1010PD	APS DROP 0.30X75	100
A1041PD	APS DROP 0.32x40	100
A1037PS	APS Fascia/Superficial 0,16x13	100
A1038PS	APS Fascia/Superficial 0,18x25	100
A1042PS	APS Fascia/Superficial 0,25x40	100
A1045PS	APS Fascia/Superficial 0,30x30	100
A1040PS	APS Fascia/Superficial 0,30X40	100
A1042BPS	APS Fascia/Superficial 0,30X50	100
A1042CP-T	APS SAFETY TUBE 0,30x60	100
A1010P-T	APS SAFETY TUBE 0,30x75	100
A1047P-T	APS SAFETY TUBE 0.30x100	100
A1049P-T	APS SAFETY TUBE 0.30x125	100
A1048P-T	APS SAFETY TUBE 0.35x100	100
A1050P-T	APS SAFETY TUBE 0.35x125	100
A1051P-T	APS SAFETY TUBE 0.40x125	100
A1052P-T	APS SAFETY TUBE 0.45x135	100