

Grapadora



Grapadora de uso médico, exclusivo para la sutura quirúrgica de la piel: cirugía general, de corazón y mama, cirugía plástica, neurocirugía, urgencias, ginecología y obstetricia.

Materiales: (100% exento de látex). Las grapadoras están fabricadas con materiales 100% exentos de látex.

Esterilización: esterilizado con Óxido de Etileno 100% a 54°C de acuerdo a la norma ISO11135. NO REESTERILIZABLE.

Test de biocompatibilidad: Testado según la norma ISO10993. Material biocompatible, no presenta citotoxicidad, no irrita ni produce sensibilidad.

Empaquetado, Referencias y Códigos de Barras: las grapadoras están empaquetadas individualmente en cajas de 5 unidades y embalajes de 100 unidades.

Ref.	Unidades	Cód. EAN
00030	5	8432229278243
	100	8432229378240

Normativas

Directiva 93/42/EC

Producto de Clase IIa

Marcado CE 0123

Características de las grapas:

<u>Artículo</u>	<u>Modelo</u>	
	F-35R (Tamaño estándar)	F-35R (Tamaño estándar)
Diámetro de la grapa	ø 0.5 mm	ø 0.6 mm
Tamaño de la grapa después de grapar	5.9 mm (ancho) x 3.9 mm (alto)	7.2 mm (ancho) x 4.9 mm (alto)
Número de grapas	35	35
Método de esterilización	Óxido de etileno	Óxido de etileno
Período de validez	5 años	5 años



Instrucciones de uso:

1. Retirar el papel y sacar la grapadora.
2. Separar y sostener la piel de ambos lados de la herida con unas pinzas.
3. Asegurarse de que el extremo delantero de la grapadora está bien situado sobre la herida y que la grapa está vertical al eje longitudinal de la incisión.
4. Colocar la grapadora en la incisión hasta que la flecha delantera coincida con la línea media de la incisión.
5. No presionar en exceso al colocar la grapa puesto que esto hará que su retirada pueda ser dolorosa y complicada.
6. Precaución: Mantener la empuñadura apretada y no aflojarla hasta que la grapa esté fuera.
7. Retirar la grapadora y prepararse para colocar la siguiente grapa.